

Piilolinssiopas Proclear® 1 day multifocal –piilolinssijä varten

Erilaiset asiakkaat. Yksinkertainen linssinvalintaprosessi.

Asiintuatuinen menetelmä helpottaa piilolinssin valintaa.

- Keskeällä asfäärinen lukuosa
- Muotoiltu yksitehoprofiiliksi
 - Säilyttää kaukonäön, vähentää tarvetta tehdä näkökykyyn liittyviä kompromisseja
- Lähisäys ei-dominantissa silmässä
 - Optimoii näön lähelle ja välietäisyyksille ja säilyttää yhteisnäön
 - Sopii käyttäjille, joiden lähisäys on enintään +2,50.
- Tarjoaa luonnollisemman näköelämyksen

Piilolinssien valintaopas

Vaihe 1 Vahvasta refraktio ja määrätä dominantti silmä.

Vaihe 2 **Dominantti silmä:** Valitse piilolinssi sopivalla kaukovoimakkuudella.

Ei-dominantti silmä: Valitse linssi, jossa kaukovoimakkuuteen on lisätty suositeltu lähisäys käyttäjän lähisäystarpeen mukaan:

Asiakkaan lähisäys	Lähisäys
jopa +1,00	Lähisäys ei ole tarpeen
+1,25...+1,75	+0,75 D
+2,00...+2,50	0,75 D - +1,00 D

Esimerkki refraktiosta: -2,00 OU ja +1,75 lähisäys

Proclear 1 day multifocal Lens Rx


Dominantti silmä	Ei-dominantti silmä
-2,00	-1,25

Vaihe 3 Anna linssien asettua hetki ennen näön tarkastusta. Jos asiakas on tyytyväinen näköön, piilolinssit voidaan luovuttaa koekäyttöön.

Optimointivinkkejä

Paranna kaukonäköä tekemällä dominantin silmän ylirefraktio +/- 0,25 D askelein yhteisnäkötilanteessa. Monet optikot ovat havainneet, että +0,25 D lisäys dominanttiin silmään 2 vaiheessa parantaa kaukonäköä.

Paranna lähinäköä tekemällä ei-dominantin silmän ylirefraktio +/- 0,25 D askelein yhteisnäkötilanteessa.

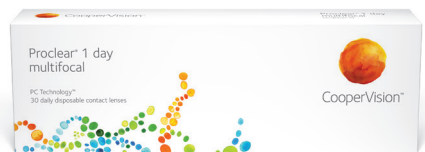

Innovatiivinen menetelmä. Useita syitä valita Proclear.

Parantaa lähinäköä kaukonäköä heikentämättä.

- Helppo sovitus ikänäön eri vaiheissa oleville käyttäjille
 - Muotoiltu yksitehoprofiiliksi
 - Vähentää tarvetta tehdä kompromisseja kaukonäön suhteen
- Linssien muotoilu tekee piilolinssien sovituksesta helppoa
 - Lyhentää vastaanottoaikaa ja minimoi seurantakäyntien määrän
- Laaja parametrialue
- Uusi menetelmä näöntarpeiden täyttämiseen kertalinssikäyttäjien parissa

Erilaiset asiakkaat. Yksi Proclear.

Korjaa molemmat silmät erikseen samalla kun se säilyttää yhteisnäön

- Käyttää erilaisia voimakkuuksia eri silmissä lähinäön parantamiseksi. Samalla se minimoi kompromissit kaukonäön kanssa
- Lähettää erilliset signaalit kummallekin silmälle, minkä ansiosta aivot pystyvät luomaan terävemmän kuvan

Huomattava parannus monovisioniin verrattuna

- Säilyttää yhteisnäön suuremmilla lähilisyksillä ja tarjoaa paremman näöntarkkuuden kuin monovision
- Parantaa syvyysnäköä, näköä välietäisyyksille ja hämäränäköä
- Monitehorakenne

Tuotetiedot

Proclear 1 day multifocal

Voimakkuus +6,00...-10,00 (0,25 välein;
0,50 välein -6,00 jälkeen)

Lähilisyys Muotoiltu yksitehoprofiiliksi

Kaarevuus 8,7 mm

Halkaisija 14,2 mm

